
LUGOL FUERTE 2% P/ PRUEBA DE SCHILLER**USO PRETENDIDO:**

Prueba colposcópica para la investigación de células displásicas o carcinomatosas del cuello uterino, sirviendo como diagnóstico de neoplasias uterinas.

REACTIVOS Y PRESENTACIÓN:

yodo ----- 2 gr
yoduro de potasio ----- 4 gr
agua filtrada GSP ----- 100ml

PRESENTACIÓN: frascos de 1000 ml

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS:

El colorante debe ser mantenido en el frasco original, bien sellado, en temperatura ambiente y al abrigo de la luz.

CONTRA INDICACIONES:

- Hipersensibilidad a compuestos que contengan yodo.
 - Embarazo.
-

PROCEDIMIENTO TÉCNICO:

Luego bañar el cuello uterino con la solución de Lugol, se debe observar el resultado: el surgimiento de una coloración marrón (oscuro o claro) significa Schiller negativo; ausencia de coloración muestra prueba positiva. En los casos de condiloma, la prueba de Schiller es siempre negativa.

PRECAUCIONES:

- Historial de alergia.
 - Puede intervenir en las pruebas de función de tiroides.
-

ASPECTOS FARMACÉUTICOS:

Las soluciones a 2% de yodo son razonablemente estables. Como el yodo es sublimado, *in natura*, en solución puede ser estabilizado por la adición de yoduro de potasio.

La formulación con 2% yodo y 4% yodeto deja esa solución particularmente resistente a la degradación, mas puede ocurrir con exposición continuada a la luz, aire y calor. Debe ser mantenida al abrigo de la luz directa, en un lugar frío (Hasta 25°C) y seco, en un frasco de color ámbar bien cerrado.

BIBLIOGRAFIA:

Reproducido de:

Formulário Terapêutico Nacional 2008: Rename 2006

Série B. Textos Básicos de Saúde

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Brasília / DF – 2008

DOCUMENTO DE GARANTÍA:

RenyLab garantiza el cambio de este conjunto diagnóstico, siempre que el conjunto esté dentro de la fecha de validez y sea comprobado por su Asesoría Técnica que no hubo fallos en la aplicación, manipulación y conservación de este producto. RenyLab y sus distribuidores no se responsabilizan por fallos en el rendimiento del kit bajo estas condiciones.

RenyLab Química e Farmacêutica Ltda

Rodovia BR 040 km 697 Caiçaras

Cep: 36.205-666 - Barbacena – MG - Brasil

Tel.: (+55 32) 3052-7746 / 3331-4489

RUC / NIT / RUT: 00.562.583/0001-44

www.renylab.ind.br

Técnico Responsable: Dr. Renê Vaz de Mello.

CRF-MG:2709

Registro en el Ministério de la Salud: 80002670066