
RENYFIX**USO PRETENDIDO:**

Renyfix es un producto para diagnóstico de uso in vitro indicado para la fijación de material biológico en láminas de vidrio partir de material recogido partir del cuello del útero, pared vaginal, etc.

PRESENTACIÓN:

Frasco spray con 100 mL.

MATERIALES NECESÁRIOS NO OFRECIDOS:

1. Láminas.
 2. Laminillas.
-

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS:

El producto debe ser mantenido en el frasco original, bien sellado, en temperatura ambiente y al abrigo de la luz.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES:

1. Los cuidados habituales de seguridad deben ser aplicados en la manipulación del producto.
 2. Solamente para uso diagnóstico "in vitro".
 3. Evitar el contacto con la piel y mucosas.
 4. En caso de contaminación accidental lavar el área afectada con agua corriente.
 5. Por tratarse de una solución alcohólica se deben tomar los cuidados inherentes al uso de alcohol en un laboratorio.
-

MUESTRA:

1. Material cervical.
-

PROCEDIMIENTO TÉCNICO:

1. Preparar los frotis y dejar secar a temperatura ambiente;
 2. Fijar los frotis.
-

CONTROL DE CALIDAD:

Antes que sean liberadas para el consumo las materias primas y los reactivos son evaluados por el Departamento de Control de Calidad de la RenyLab.

La limpieza y secado adecuado del material a ser utilizado son de fundamental importancia para la estabilidad de los reactivos y obtención de resultados correctos. No usar detergentes hechos de fosfato.

El agua utilizada en la limpieza del material debe ser de buena calidad.

Las láminas utilizadas deben ser completamente limpas, exentas de gordura.

BIBLIOGRAFIA:

1. Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*; 1986.
 2. Lima O. A.; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992.
-

DOCUMENTO DE GARANTÍA:

La RenyLab Química e Farmacêutica garantiza el cambio de este conjunto diagnóstico, siempre que el conjunto esté dentro de la fecha de caducidad y sea comprobado por su Asesoría Técnica que no hubo fallos en la aplicación, manipulación y conservación de este producto.

La RenyLab y sus distribuidores no se responsabilizan por fallos en el rendimiento del conjunto bajo estas condiciones.

RenyLab Química e Farmacêutica Ltda

Rodovia BR 040 km 697 Caiçaras

RUC / NIT / RUT: 00.562.583/0001-44

CEP 36.205-666 - Barbacena – MG - Brasil

Teléfono (+55 32) 3052-7746 / 3331-4489

Responsable técnico: Renê Vaz de Mello

CRF-MG: 2709

www.renylab.ind.br

Registro en el Ministério de la Salud: Exento de Registro